



## Bruksanvisning

TT-Safe Med tryckavlastande madrasser, sittdynor, hälskydd och överdrag



### TT Safe-Med produkterna

kan maskintvättas i 95°C och torktumlas torra. De kan även torkas i torkskåp.

För att underlätta vid tvätt, blötlägg eller värm madrass och sittdyna i ljummet vatten. De blir då mjuka och följsamma och lättare att stoppa i en tvättmaskin.

### Rosa madrass

Patientvikt 50-80 kg, vikt 2,5 kg  
Mått 200x80x3 cm, art.nr 951181P  
200x90x3 cm, art.nr 952191P

### Gul madrass

Patientvikt <50 kg, vikt 5 kg  
Mått 200x80x6 cm, art.nr 951181Y  
200x90x6 cm, art.nr 952191Y

### Sittdynor, 40x45x6 cm

955105P Rosa                      955104PG Rosa/Grå  
955105G Grå                      955105V Vanilla Gul

Vid torktumling är det viktigt att produkterna inte ligger fast mot trumman utan kan rotera fritt inne i torktumslaren.

Madrasser kan vikas eller rullas ihop och liten plats vid förvaring eller transport. Materialet formar sig mjukt efter kroppens konturer.

Det kan maskintvättas i 95°C eller avtorkas med alkohollösning. Comfor är även auto-klaverbart. Det torktumlas torrt.

Comfor är ett semi-permeabelt skyddsöverdrag tillverkat i polyester. Comfor är fritt från PVC och latex.

Comfor andas och släpper igenom fukt och vatten i ångform. Det är tunt, mjukt, töjbart och elastiskt.

### Rosa/Gul madrass

Patientvikt 50-110 kg, vikt 5 kg  
Mått: 200x80x6 cm, art.nr 951181YP  
200x90x6 cm, art.nr 952191YP

### Rosa/Grå madrass

Patientvikt 80-130 kg, vikt 3 kg  
Mått: 200x80x4 cm, art.nr 951181PG  
200x90x4 cm, art.nr 952191PG

### Hälskydd, färg: Gul/brun

Art.nr 954114, mått: 7x10 cm, Ø18 cm  
Art.nr 9541142, mått: 7x30 cm, Ø18 cm

## Comfor avtorkbara överdrag

Art.nr	Produkt	Mått	För madrass
956804	Fodral m blixtlås	80x200x4 cm	Rosa, Rosa/Grå
956806	Fodral m blixtlås	80x200x6 cm	Gul, Gul/Rosa
956904	Fodral m blixtlås	90x200x4 cm	Rosa, Rosa/Grå
956906	Fodral m blixtlås	90x200x6 cm	Gul, Gul/Rosa
956114	Lakansskydd	100x140 cm	
956214	Lakansskydd	200x140 cm	
956104	Fodral m blixtlås	40x45x6 cm	Sittdyna