



Bruksanvisning

Axillarkrycka art.nr: 141150–141162

1. Allmänna råd

Be någon kunnig person intruera dig hur man använder en axillarkrycka samt be dem visa hur axillarkryckans olika inställningar fungerar. Tänk på följande punkter:

- Var försiktig vid gång på halt eller ojämt underlag. Montera på en isbrodd på vintern.
- Om möjligt, gå ej i trappor utan hjälp och stöd av någon annan person.

2. Viktigt!

- Anpassa längden på axillarkryckan till din egen längd (se nedan).

- Max brukarvikt: 100 kg**

3. Varning

- Trappor utan ledstång är en besvärlig miljö för kryckanvändare. Var mycket försiktig om du måste ta dig fram i denna typ av situation.
- Häng inte handväskor, påsar eller liknande föremål på kryckan vid användandet.
- Kryckor skall enbart användas som gånghjälpmedel. Inte för andra ändamål såsom t.ex. att flytta eller lyfta på saker.
- Vi kan inte garantera kryckans kvalitet och funktion om den mekaniskt ändrats på något sätt. Använd endast original reservdelar eller tillbehör.
- Om kryckan inte används under en längre tid, vänligen be någon kvalificerad person undersöka kryckan innan den åter tas i bruk.

4. Användning

- Gånghjälpmedel används av många olika och skiftande anledningar. Be om ordentlig hjälp, råd och träning om du provar ut axillarkrycka för första gången.

5. Is och snö


- Undvik att gå på is och snö utan att utrusta axillarkryckan med isbrodd.

6. Om något är fel...


- Kontakta kunnig personal om något lossnat eller något gått sönder på kryckan.

7. Rengöring


- Rengör kryckan med en fuktig trasa och vid behov ett mildt rengöringsmedel. Torka tork. Använd aldrig feta eller oljiga rengöringsmedel.

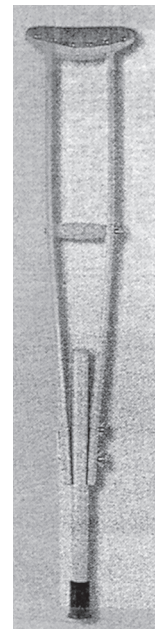

Axillarkrycka i trä.

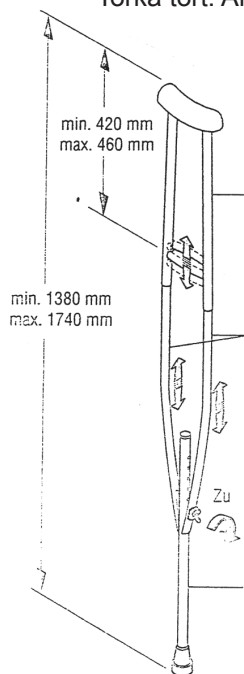

Axillarkrycka i lättmetall.

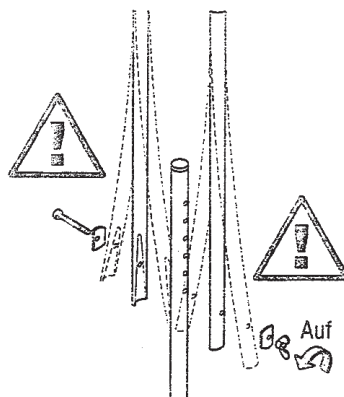

Höjden på Axillarkryckan kan justeras efter Brukarens längd. Lossa skruvarna (på metallkryckan) respektive skruvarna och bygeln (på träkryckan) och ställ in önskad längd. Underdelen av de långsgående stagen är fjädrade. Se upp så att skruvar inte flyger iväg vid demontering!