



Bruksanvisning

MerryArm toalettarmstöd art.nr: 720624 | art.nr: 720629



MerryArm, (OB-stödet) monteras vid toalett och används som uppresningsstöd och som hjälp för att sätta sig på toaletten. Stödet är tillverkat av reptåligt, vit epoxylackerad plattovalt stålrör.

MerryArm kan fällas upp mot väggen och monteras med hjälp av en stor (standard) eller liten väggplatta (tillbehör). Toalettpappershållare i rostfritt stål, art.nr: 720625, eller vit, art.nr: 720627, finns som tillbehör.

Stödet fälls upp mot väggen med ett enkelt handgrepp. När stödet skall fällas ner, fatta tag i stödet och dra det nedåt!

MerryArm rengöres med ett mildt rengöringsmedel. Undvik klorhaltiga medel. MerryArm är ett "Bra Hjälpmedel"

Monteringsanvisning

Placering

Stödet bör monteras på ett avstånd av 30–35 cm räknat från toalettstolens mittlinje.

Montering i vägg

Håll stödet mot väggen på samma höjd som stödbenets (4) när det är utfällt 90 grader i förhållande till överliggaren.

Märk upp ett hål med en skruv och rikta in stödet. Märk också upp och borra övriga hål. Finjustera innan skruvarna dras åt.

Material

6-8 mm skruv bör användas. Skruvtyp och längd anpassas till väggmaterialet. Vid montering i gipsvägg eller liknande väggmaterial används specialbultar eller förstärkningsplåt och genomgående bultar.

OBS!


Det kan hända att toalettstolens spolammare är så hög att man ej kommer åt att förborra det inre hålet på standardfästet.

Alt 1. Vid dessa tillfällen används fäste.


Alt 2. art.nr: 720623.

Medföljer

En sats skruv.

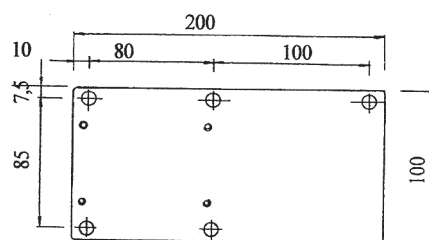

Alt. 1

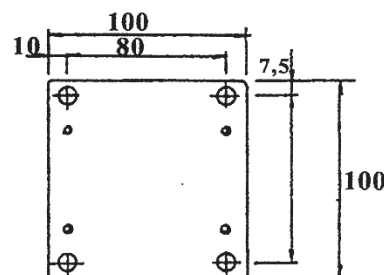

Alt 2

Art nr 720623

