




Bruksanvisning

MerryLou toalettstolsförhöjning art.nr: 147200


MerryLou är en hopfällbar toalettstolsförhöjning som man kan ta med sig på t.ex. resor.

Den har inga lösa delar, har släta plasttytor som är lätta att rengöra och passar till de flesta på marknaden förekommande toalettstolar. MerryLou ökar sitthöjden med 12 cm, väger endast 700 gram och klarar en belastning på 75 kg. Den rengöres med vanliga toalett-rengöringsmedel och vatten. MerryLou levereras i en praktisk förvaringspåse i grå galon.


OBS! Snedbelastning kan leda till tipprisk.

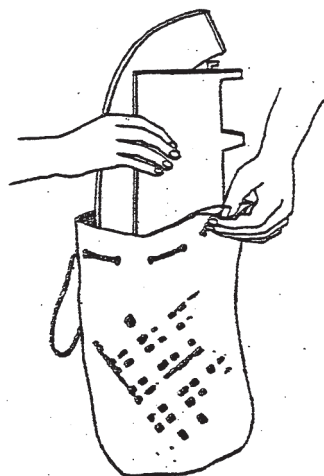


MerryLou levereras hopfäld i en transportpåse i grå galon.

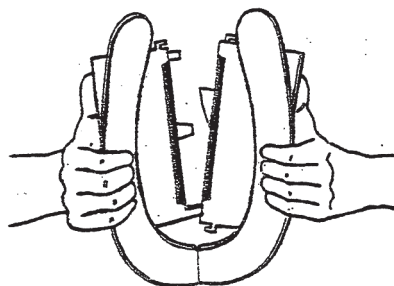


Fatta förhöjningen med båda händerna med undersidan uppåt och öppning framåt.

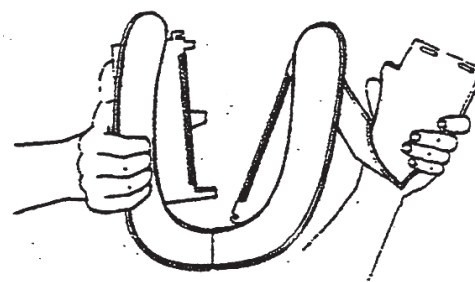


Vik ut den tredelade sockeln med vänster hand.

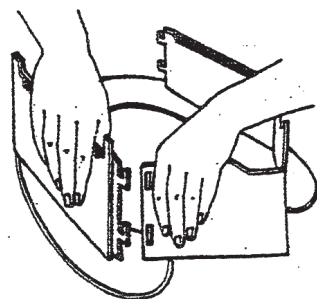

Sammanfoga sockeln genom att haka samman bakstycket och sidostycket.

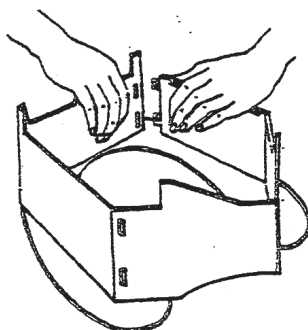

Sammanfoga sockeln framstycke med sidostycket på motsvarande sätt.

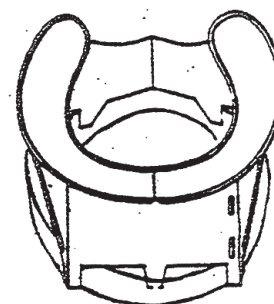

Fäll upp toalettstolen. Placera MerryLou på porslinet med sittringens öppning framåt och den främre mittersta styrpinnen innanför porslinet.