



## Bruksanvisning Stödkäpp SoftGrepp lättmetall

### Användning

Be om ordentlig hjälp, råd och träning när stödkäppen provas ut för första gången. Max brukarvikt på stödkäpparna är 100 kg.

### Is och snö

Undvik att gå på is och snö utan isbrodd eller doppsko med inbyggd isdubb typ Ingrid.

### Rengöring

Rengör stödkäppen med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel. Torka torrt.

### Om något är fel


Kontakta kunnig personal om något lossnat eller något gått sönder på stödkäppen.

Art.nr: 141140	fast längd 100 cm, derby grepp.
Art.nr: 141141	justerbar längd 79-99 cm, derby grepp.
Art.nr: 141144	fast längd 101 cm, anatomiskt grepp, höger.
Art.nr: 141145	fast längd 101 cm, anatomiskt grepp, vänster.
Art.nr: 141146	justerbar längd 78-98 cm, anatomiskt grepp, höger.
Art.nr: 141147	justerbar längd 78-98 cm, anatomiskt grepp, vänster.

### Viktigt – stödkäpp med fast längd

Så här kappar man till lämplig längd (fig.E)

1. Ta på de skor som oftast används
2. Vänd käppen upp och ner med greppet vilande mot golvet
3. Stå avslappnad med hängande armar
4. Märk ut handledsknölen på stödkäppen
5. Såga av stödkäppen med såg eller rörkap (fig F)
6. Montera doppsko

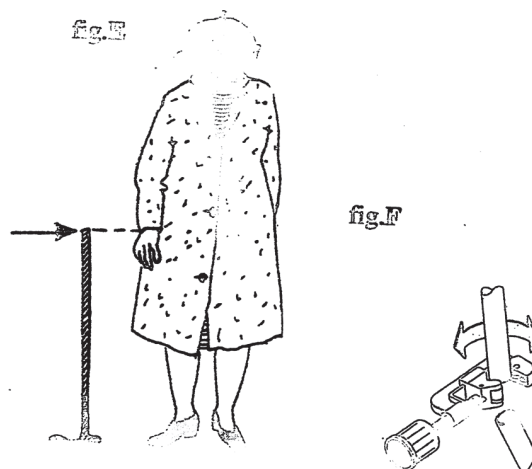

### Viktigt – stödkäpp med justerbar längd

1. Se till att knappen i snäpplåset är ordentligt på plats i sitt hål. (fig A)
2. Se till att låsringen mellan käppens över- och underdel är ordentligt fastdragen (fig D)

